

F 93 Röntgen Tankfixierer

Beschreibung :

- Röntgenfixierer für Schalen - und Tankverarbeitung aller handelsüblichen Röntgenfilme;
- Pulver;
- einteilig.

Verarbeitungsbedingungen :

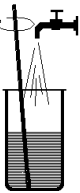
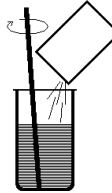
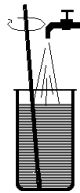
Fixierertemperatur :	18 °C	Fixierzeit :	5 - 6 min
	20 °C		4 - 5 min.
	22 °C		3 - 4 min.
	24 °C		2 - 3 min.

Regenerierrate :

- Zur Verarbeitung von 1 m² Röntgenfilm werden unter normalen Bedingungen ca. 600 ml Tanklösung benötigt.

Ansatzvorschrift :

Ansatz Röntgenfixierer :

Wasser (30 - 40 °C)	F 93 - Pulver	auffüllen mit Wasser auf
 ca. ¾ des Tank - bzw. Regeneratorvolumens		
7,5 l	- Einlösen des Pulvers muß unter ständigem Rühren erfolgen.	10,0 l
17,0 l		22,5 l
11,0 l		15,0 l

F 93 Röntgen Tankfixierer**Sortiment :**

Order-Nummer	Produktbezeichnung	Konfekt.-größe für	Kapazität (m ²)
10193	F 93	10 x 10,0 l	165
10194		5 x 22,5 l	185
10195		7 x 15,0 l	175

Lagerung und Handhabung :

- F 93 bis zum Gebrauch in original verschlossener Packung aufbewahren und bei Temperaturen von 10 bis 25 °C lagern;
- Beim Umgang mit Fotochemikalien und Lösungen geeignete Schutzhandschuhe tragen!
- Bei der Entsorgung verbrauchter Chemikalienlösungen sind die gesetzlichen Bestimmungen zu beachten.