

UNIMATIC-D Röntgenentwickler für Tischmaschinen

Beschreibung :

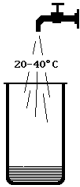
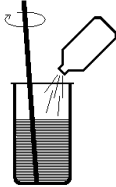
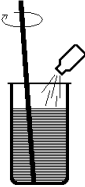
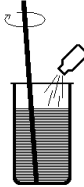
- Röntgenentwickler für alle gebräuchlichen Tischmaschinen und Maschinen mit kleinen Arbeitstankvolumina;
- mittlerer bis hoher Kontrast
- hohe Stabilität
- besonders geeignet für Verarbeitung in Kleintank - und Tischmaschinen wie Agfa Gevamatc 60 und Agfa Curix Compact;
- Flüssigkonzentrat;
- dreiteilig;

Regenerierrate :

- Zur Verarbeitung von 1 m² Röntgenfilm werden unter normalen Bedingungen **400 bis 600 ml UNIMATIC-D** benötigt.
- Bei längeren Standzeiten ohne Verarbeitung oder bei geringen Filmdurchsätzen muss eine höhere Regenerierrate gewählt werden.

Ansatzvorschrift :

Ansatz Röntgenentwickler Regenerator :

Wasser (25 - 30 °C)	Teil 1	Teil 2	Teil 3
			
1,3 l	1,0 l	0,1 l	0,1 l

- Einlösen der Teile 1 bis3 unter ständigem Rühren;
- angegebene Reihenfolge ist unbedingt einzuhalten;
- Verwendung von Starterkonzentrat ist **nicht** notwendig.

UNIMATIC-D Röntgenentwickler für Tischmaschinen**Sortiment :**

Order-Nummer	Produkt- bezeichnung	Konfekt.-größe für	Konz.-menge	Kapazität m ²
10091	UNIMATIC-D	10 x 2,5 l	Teil 1 10 x 1,0 l Teil 2 10 x 0,1 l Teil 3 10 x 0,1 l	25 - 35

Lagerung und Handhabung :

- Konzentrate bis zum Ansatz in der Originalverpackung bei 10 bis 25 °C lagern ;
- **UNIMATIC-D** enthält Bestandteile, die bei Berührung mit der Haut zu Reizungen führen können.
- Bei Berührung mit den Augen ist unverzüglich mit ausreichend Wasser zu spülen und ein Arzt zu konsultieren.