

**UNIMATIC-F Röntgenfixierer für Tischmaschinen**

**Beschreibung :**

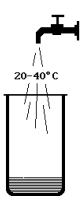
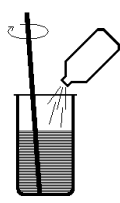
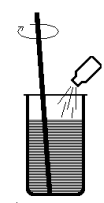
- Röntgenfixierer für alle gebräuchlichen Tischmaschinen und Maschinen mit kleinen Arbeitstankvolumina ;
- besonders geeignet für Verarbeitung in Kleintank - und Tischmaschinen wie Agfa Gevamic 60 und Agfa Curix Compact;
- gute Härteeigenschaften verhindern mechanische Beschädigungen der durchlaufenden Filme ;
- Sicherung der Ausfixierung auch bei schnellen Maschinen durch besondere Fixierkomponenten ;
- Flüssigkonzentrat ;
- zweiteilig ;

**Regenerierrate :**

- Zur Verarbeitung von 1 m<sup>2</sup> Röntgenfilm werden unter normalen Bedingungen 650 bis 800 ml UNIMATIC-F benötigt.

**Ansatzvorschrift :**

Ansatz Röntgenfixierer Regenerator :

Wasser ( 25 - 30 °C )	Teil 1	Teil 2
		
1,9 l	0,5 l	0,1 l

- Einlösen der Teile 1 und 2 unter ständigem Rühren ;
- angegebene Reihenfolge ist unbedingt einzuhalten ;

**UNIMATIC-F Röntgenfixierer für Tischmaschinen****Sortiment :**

Order-Nummer	Produkt-bezeichnung	Konfekt.-größe für	Konz.-menge	Kapazität m <sup>2</sup>
10094	UNIMATIC-F	10 x 2,5 l	Teil 1 10 x 0,5 l Teil 2 10 x 0,1 l	18 - 23

**Lagerung und Handhabung :**

- Konzentrate bis zum Ansatz in der Originalverpackung bei 10 bis 25 °C lagern ;
- **UNIMATIC-F** enthält Bestandteile, die bei Berührung mit der Haut zu Reizungen führen können.
- Bei Berührung mit den Augen ist unverzüglich mit ausreichend Wasser zu spülen und ein Arzt zu konsultieren.