

T 32

ENTWICKLERKONZENTRAT FÜR MANUELLE VERARBEITUNG

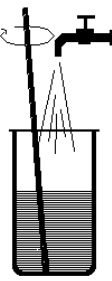
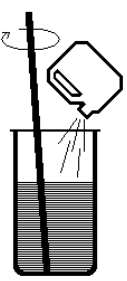
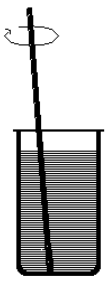
Produktbeschreibung:

T 32 ist ein Röntgenentwicklerkonzentrat für die manuelle Verarbeitung von medizinischen und technischen (NDT) Röntgenfilmen in Schale und Tank. Hervorragende sensitometrische Eigenschaften und hohe Stabilität kennzeichnen das Produkt. T 32 ist ein einteiliges Konzentrat.

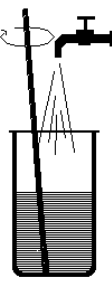
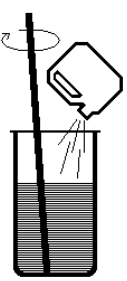
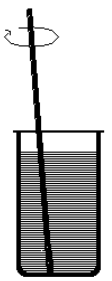
Verarbeitungsparameter:

Entwicklungstemperatur 18 °C	Entwicklungszeit 6 min
20 °C	5 min
22 °C	4 min
24 °C	3 min
26 °C	2 min

Ansatzvorschrift Arbeitslösung

Order #	für	Wasser 25°C	Konzentrat			Lösung
						
10042	2 x 25 L	20 L	5,0 L			25 L
10040	4 x 5 L	4 L	1,0 L			5 L

Ansatzvorschrift Regenerator (Nachfüll-Lösung):

Order #	für	Wasser 25°C	Konzentrat			Lösung
						
10042	2 x 25 L	12,5 L	5,0 L			17,5 L
10040	4 x 5 L	2,5 L	1,0 L			3,5 L

Nach Zugabe des Konzentrates in Ansatzwasser bis zur vollständigen Lösung rühren.

Handhabung und Lagerung:

Hersteller:
 Calbe Chemie GmbH, Stadtfeld 31, D-39240 Calbe, Germany
 T +49-39291-4250
 E info@calbe-chemie.de
 W calbe-chemie.de
 Last Review 25.03.2025

Bis zur Verwendung sollten alle Konzentratteile in originalverschlossenen (versiegelten) Behältern verbleiben. Als Lagertemperatur werden 10 bis 25 °C empfohlen, eine Lagerung bei Frost führt zu irreversiblen Schäden. Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit sind zu vermeiden.

Gefahrstoffinformation:

Das Produkt enthält Stoffe, die Reizungen von Augen und Haut verursachen können. Vor Gebrauch lesen Sie bitte das verfügbare Sicherheitsdatenblatt. Das Produkt kann im Rahmen der Regelungen zum Transport gefährlicher Güter in begrenzter Menge (LQ) befördert werden.